

THERMOCHIP MINI & SURESENSE



TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE
SUL MICROCHIP.
PERCHÉ MICROCHIPPARE I PET,
COSA DICE LA LEGGE,
I VANTAGGI DI THERMOCHIP MINI.



INIZIA

#OneHealth



La scienza per animali più sani ®

*we
are
family.*
weare-family.com

INDICE

MICROCHIP: COS'È E COME FUNZIONA?



A COSA SERVE?



CHI LO APPLICA E DOVE?



PERCHÉ È IMPORTANTE IMPIANTARE UN MICROCHIP
AL PROPRIO PET?



COSA DICE LA LEGGE?



LA NOVITÀ
THERMOCHIP MINI & SURESENSE





MICROCHIP? MAXI LOVE!



L'amore per il tuo pet
non è mai stato così "micro".

Noi di MSD Animal Health sappiamo quanto tieni al tuo amico a 4 zampe.

Per garantire ad entrambi momenti di serenità insieme, abbiamo elaborato questa guida con consigli e suggerimenti sul perchè è importante microchippare il tuo pet e il vantaggio di scegliere **Thermochip Mini & SureSense**.

[< INDIETRO](#)[AVANTI >](#)



MICROCHIP: COS'È E COME FUNZIONA?

Il microchip è un dispositivo che sfrutta la tecnologia R.F.ID (Radio Frequency Identification), onde a radiofrequenza che si attivano solo in prossimità di un lettore.

Il microchip identifica in modo univoco il pet attraverso un codice di 15 cifre* assegnato dal Ministero della Salute.

* Le prime 3 cifre identificano la Nazione di appartenenza (380 per l'Italia).

SENZA BATTERIE,
NON SI SCARICA NÉ SI GUASTA

CAPSULA DI VETRO BIOCOMPATIBILE
CONFORME ALLE NORME ISO: 11784-11785

CIRCA 7-12 MM DI LUNGHEZZA,
1-2 MM DI DIAMETRO

DISPOSITIVO ELETTRONICO
DI FORMA CILINDRICA

TECNOLOGIA R.F.ID
INNOCUA PER UOMINI E ANIMALI



◀ **INDIETRO**

AVANTI ▶




A COSA SERVE?

Possiamo immaginare il microchip come la nostra Carta di Identità.

Il codice del microchip viene rilevato attraverso il lettore digitale, permettendo di **identificare un cane, un gatto o un furetto** e risalire al suo padrone.

Perché l'identificazione di un animale è importante?

- PER PREVENIRE IL TRAFFICO ILLECITO
- PER INDIVIDUARE ANIMALI AFFETTI DA MALATTIE TRASMISSIBILI (ES: LA RABBIA)

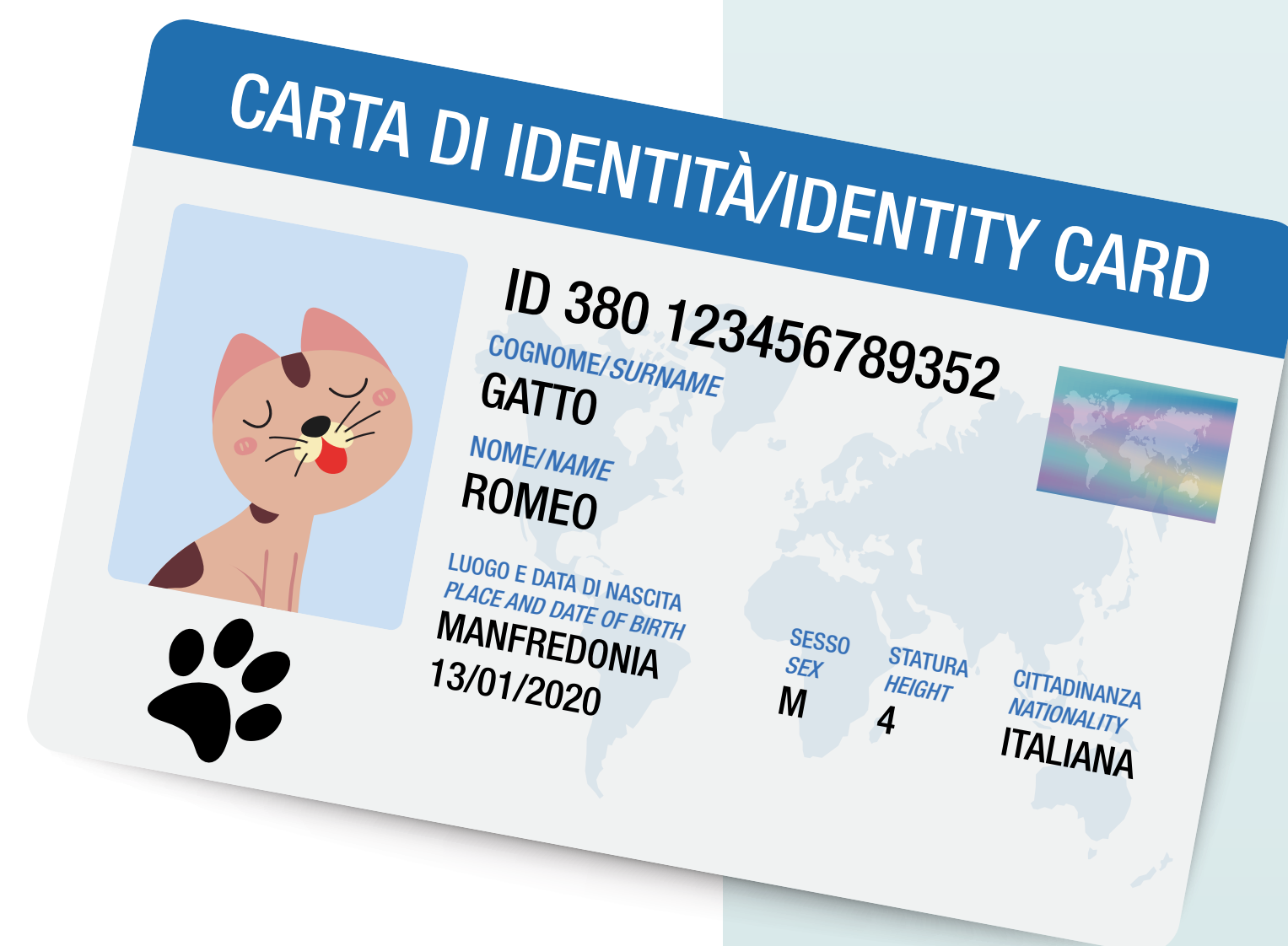

◀ INDIETRO

AVANTI ▶



CHI LO APPLICA E DOVE?

L'applicazione del microchip è semplice e veloce e va effettuata in una zona ben precisa: **nel sottocute della regione del collo, sotto l'orecchio a sinistra**. In questo modo la ricerca del chip sarà universale, ovunque ci troveremo!

L'applicazione deve essere fatta esclusivamente da un **Medico Veterinario libero professionista** o Veterinario dell'ATS, abilitati e registrati tramite un modulo al **Ministero della Salute**.

[< INDIETRO](#)[AVANTI >](#)



PERCHÉ È IMPORTANTE APPLICARE UN MICROCHIP AL TUO PET?



- L'applicazione è obbligatoria per poter **viaggiare in compagnia del tuo fedele amico a 4 zampe** che sia cane, gatto o furetto
- Certifica che il **tuo pet appartiene proprio a te e a nessun altro**. Anche in caso di **furto, contenzioso o smarrimento**
- Permette di **conoscere la distribuzione e il numero della popolazione canina**
- Indispensabile per l'**emissione di una ricetta veterinaria elettronica**
- Rappresenta un **deterrente contro i casi di abbandono volontario**
- Obbligatorio nel caso in cui si voglia **stipulare un'Assicurazione Sanitaria al pet**



◀ INDIETRO

AVANTI ▶



COSA DICE LA LEGGE?

Il microchip è l'unico sistema di identificazione Nazionale per cani, gatti e furetti, utile a identificare gli animali presenti sul territorio, per ritrovarli in caso di smarrimento, tracciare quelli malati e come metodo di lotta al randagismo.

[< INDIETRO](#)

CANE

In Italia è obbligatoria l'**iscrizione all'Anagrafe Canina** del Comune di residenza o dell'ASL competente di ogni cane, insieme all'**inserimento del microchip nel sottocute** da parte del medico Veterinario.

(Legge Quadro L.281/91, Accordo 24 Gennaio 2013)

Ogni Regione ha stabilito una propria normativa che prevede l'obbligo, da parte del proprietario o detentore, di **registrazione del cane all'Anagrafe Canina regionale**, così come quello di comunicare l'eventuale cessione o decesso.

[AVANTI >](#)



Sei proprietario di una cucciolata?

Fai applicare il microchip a tutti i cuccioli, prima di cederli e in ogni caso prima del compimento del 60° giorno di vita.

Sei proprietario di un cane?

Hai tempo 15 giorni per **comunicare all'Anagrafe Canina l'acquisizione di un cane**, anche se nato e registrato fuori Regione. Lo stesso vale per la cessione definitiva, il cambio di residenza o la morte del tuo pet.

Lo smarrimento del proprio cane invece, va segnalato al Corpo di Polizia Municipale entro 3 giorni.

In viaggio con il cane, come farlo al meglio?

Se stai programmando un viaggio oltreconfine, il cane deve essere provvisto di **libretto sanitario** e di un certificato emesso dal tuo Veterinario che comprovi la **validità della vaccinazione antirabbica**.

Quando viaggi insieme al tuo cane, **assicurati che abbia il microchip e sia sempre facilmente identificabile tramite un collare** con il suo nome, il tuo numero di telefono e altre informazioni di contatto.



◀ **INDIETRO**

AVANTI ▶



GATTO

In Italia, nonostante esista un'Anagrafe Nazionale Felina, non vi è l'obbligo di microchippare il gatto in tutte le Regioni, tuttavia è **fortemente consigliato**.

I gatti che si muovono all'interno dell'UE, acquistati o adottati all'estero, così come i cani e i furetti, devono invece essere **identificati tramite microchip e muniti di passaporto**.

Diverso il caso delle colonie feline, i cui gatti all'atto della sterilizzazione, devono essere **identificati e registrati** nell'Anagrafe degli Animali d'Affezione da parte del Comune. Il loro responsabile e detentore è il Sindaco della città in cui risiedono.



LO SAPEVI CHE...

La prima regione che ha reso obbligatoria la microchippatura del gatto è la Lombardia.

Tutti i gatti nati o acquisiti a partire dal 1 Gennaio 2020 devono essere microchippati.



RICORDATI CHE SE HAI ADOTTATO UN GATTO PRIMA DI TALE DATA PUOI SEMPRE MICROCHIPPARLO IN QUALSIASI MOMENTO.

(ART. 37 LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2019 N.9)

◀ **INDIETRO**

AVANTI ▶



PERCHÉ MICROCHIPPARE UN GATTO CHE VIVE IN CASA?

I gatti sono avventurosi! Non è strano che accidentalmente possano cadere dalle finestre o dai balconi di casa, spaventarsi o scappare dal giardino di casa per poi **essere ri-adottati da altre famiglie.**

Non microchippare il proprio gatto significa correre il rischio di perderlo, senza avere la possibilità di dimostrare che fa parte della tua famiglia.



◀ **INDIETRO**

AVANTI ▶



LA NOVITÀ

THERMOCHIP MINI & SURESENSE

◀ **INDIETRO**

AVANTI ▶




PIÙ DI UN SEMPLICE MICROCHIP!

Thermochip Mini è il **PRIMO E UNICO** microchip di identificazione con **bionsensore** incorporato che rileva la temperatura di cani, gatti e furetti.

- Contiene un numero di identificazione di 15 cifre, univoco e inalterabile
- Misura la temperatura del pet nel sito di impianto, in un intervallo da 33°C a 43°C
- **Permette la lettura simultanea del numero di identificazione e della temperatura del tuo pet**
- È certificato Norme ISO, specifiche per l'identificazione degli animali e sterilizzazione dei dispositivi medici
- È adatto a cani, gatti e furetti



THERMOCHIP MINI

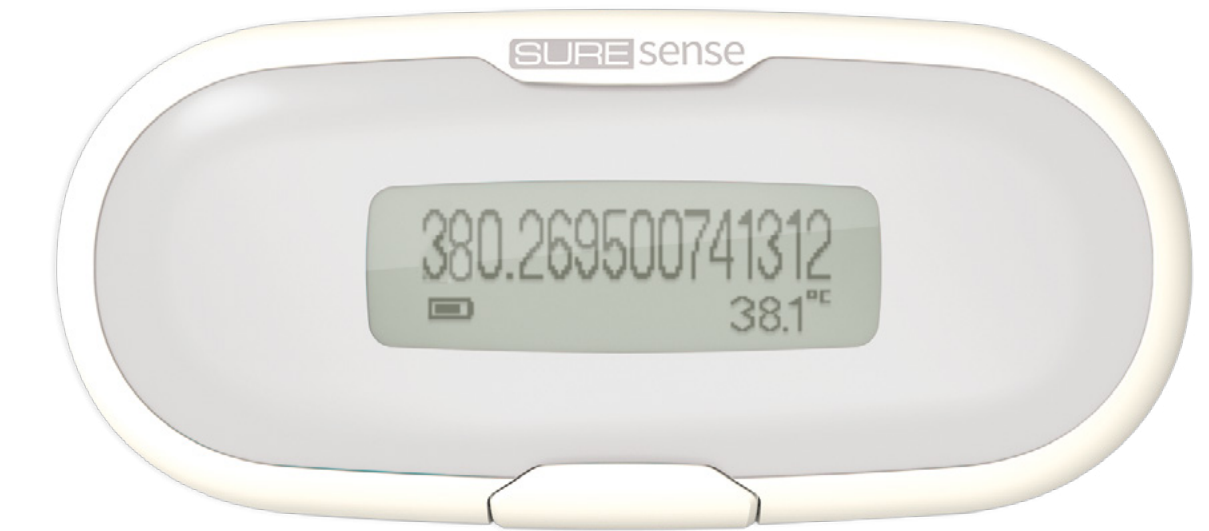

LETTORE SURESENSE



LO SAPEVI CHE?

L'applicazione del Thermochip Mini richiede l'utilizzo di uno strumento che salvaguarda l'ambiente, essendo completamente riciclabile.

[< INDIETRO](#)[AVANTI >](#)



LETTORE SURESENSE MICROCHIP READER

Thermochip Mini è in grado di **rilevare la temperatura sottocutanea** del pet nel punto di impianto, attraverso l'utilizzo del lettore SureSense Microchip Reader.

DUE FUNZIONI, UN UNICO DEVICE!

Con Thermochip Mini puoi:

- Leggere il codice di identificazione del pet di 15 cifre.
- Misurare frequentemente la temperatura di cani, gatti o furetti in modo non invasivo e senza stress.

[< INDIETRO](#)

Lo sapevi che?


Con misurazioni ripetute e consecutive è possibile **stabilire l'intervallo della temperatura del pet**, rilevando eventuali variazioni*.

Questo approccio permette di **intervenire prima che la malattia si manifesti**, in un'ottica di **MEDICINA PREVENTIVA**.

*Variazioni atipiche rispetto all'intervallo possono essere indicative di cambiamenti nel benessere dell'animale.

SureSense è l'unico dispositivo che ti permette di effettuare in autonomia le letture di temperatura del tuo amico a 4 zampe, senza stress né per te né per il tuo pet.

[AVANTI >](#)

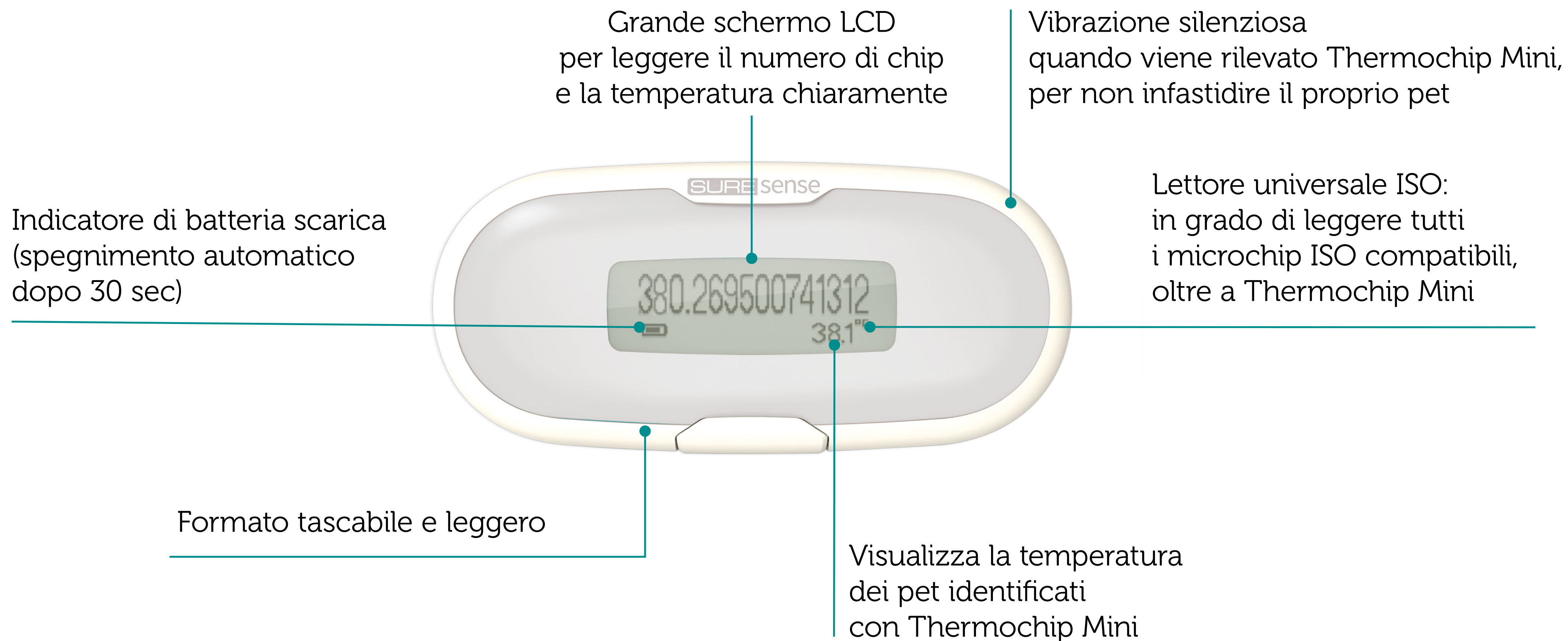



CONSIGLI UTILI

La temperatura nei nostri amici a 4 zampe è un parametro importante e può dipendere da tantissimi fattori quali: sesso, razza, età, orario di rilevazione della temperatura, ecc.

Monitorare in modo continuativo il tuo pet in salute, ti permette di conoscere l'intervallo normale della sua temperatura.

Questo è utile in caso si noti qualcosa di strano, in modo da consultare per tempo il proprio Veterinario di fiducia.

[< INDIETRO](#)

ATTENZIONE!

- Non misurare la temperatura al tuo pet se è rimasto al sole per un po'
- Non misurare la temperatura al tuo pet subito dopo una lunga passeggiata o esercizio fisico
- La temperatura dei nostri amici a 4 zampe è diversa dalla tua, non fare paragoni

Se la temperatura del tuo pet si discosta dalle temperature "normali" e ti sembra che ci sia qualcosa di strano in lui, consulta il tuo Veterinario.

[AVANTI >](#)



**CHIEDI AL TUO
VET DI APPLICARE
AL TUO PET
THERMOCHIP
MINI!**



**VUOI SAPERNE DI PIÙ?
CHIEDI SEMPRE
CONSIGLIO
AL TUO VETERINARIO!**

◀ **INDIETRO**

AVANTI ▶



I BENEFICI PER IL PET

Meno stress:

La visita dal veterinario in alcuni casi è un momento stressante.

Con **Thermochip Mini & SureSense**, monitorando comodamente a casa la temperatura del tuo pet, potrai contribuire a ridurre il suo stress e darai al tuo veterinario un dato più affidabile.

Prevenzione:

Possibilità di misurare la temperatura del tuo pet prima della manifestazione di segni clinici, così da intervenire tempestivamente con il tuo Veterinario.

Questo ti consente di isolare il pet in caso in cui tu ne possieda più di uno, proteggendo la salute degli altri.

[< INDIETRO](#)[AVANTI >](#)



I VANTAGGI PER IL PET MATE

Meno stress:

Possibilità di monitorare la temperatura sottocutanea del tuo pet in qualunque momento, consultando il Veterinario di fiducia in caso di anomalie.


Meno stress sia psichico che fisico!

Autonomia:

Capacità del proprietario nel monitorare la temperatura in modo autonomo.

Sicurezza e tranquillità:

Dopo una chirurgia o un ricovero, monitorare la temperatura del tuo pet a casa, può aiutarti a scoprire con anticipo eventuali complicanze o confermarti che tutto sta procedendo per il meglio.

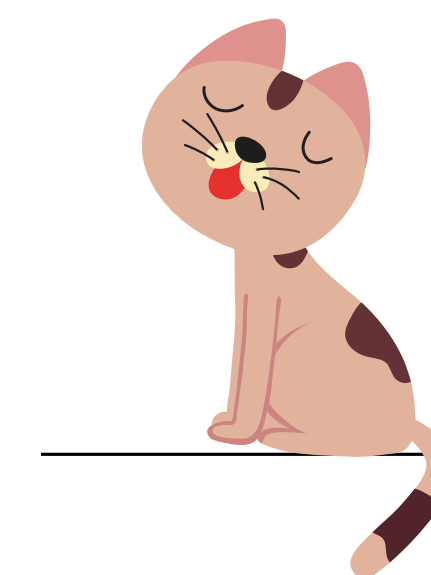[< INDIETRO](#)[AVANTI >](#)



IDEALE PER CHI AMA I CANI E...

... vorrebbe allargare la sua famiglia adottando un amico a quattro zampe. Perfetto anche per allevamenti, canili e proprietari di cucciolate.

**MICROCHIPPARE IL CANE È UN OBBLIGO.
THERMOCHIPPARLO UN VANTAGGIO!**



◀ **INDIETRO**

IDEALE PER CHI AMA I GATTI E...

... desidera essere sicuro che la paternità o maternità del suo gatto gli sia sempre riconosciuta, per esempio in caso di smarrimento. Perfetto anche per chi ha in programma viaggi all'estero con il suo amico felino. Adatto a tutti coloro che hanno a cuore la salute del proprio gatto e desiderano monitorarla in autonomia.

- **STRESS + BENESSERE!**

I gatti sono animali sensibili e fortemente soggetti a stress. Thermohip Mini è la soluzione che aiuta sia te che il tuo amico a 4 zampe a stare più sereni!

**MICROCHIPPARE IL GATTO È UN GESTO D'AMORE.
THERMOCHIPPARLO UNA SICUREZZA IN PIÙ!**

AVANTI ▶



CHIEDI AL TUO VETERINARIO DI APPLICARE AL TUO PET, SE NON È GIÀ MICROCHIPPATO, **THERMOCHIP MINI: TUTTA LA SICUREZZA DI UN MICROCHIP, CON I VANTAGGI DI UNO STRUMENTO DI MEDICINA PREVENTIVA.**

Thermochip Mini è l'unico microchip che identifica il tuo pet, se non è già microchippato, e ti **permette di monitorare in ogni momento il suo stato di salute**, rilevando la sua temperatura in modo immediato e **senza stress: NÉ PER TE, NÉ PER LUI!**

[< INDIETRO](#)[AVANTI >](#)



DESIDERI DIVENTARE UN PET MATE OGNI GIORNO MIGLIORE?

Affidati sempre al tuo Vet di fiducia
e segui MSD Animal Health.

Per maggiori informazioni su
Thermochip Mini & SureSense
visita il sito.

www.msd-animal-health.it



#OneHealth



La scienza per animali più sani[®]

*We
are
family.*
weare-family.com